

採血用穿刺補助器具

オートランセット II



穿刺深さ自由自在




穿刺深さが5段階に調節できるので
患者さん一人一人が最適な穿刺深さを選ぶことが可能です。

採血用穿刺補助器具

オートランセット II

使用方法


穿刺深さの調節

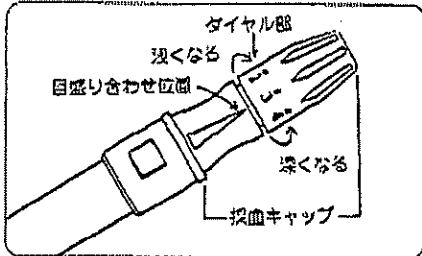


穿刺深さは、採血キャップのダイヤルを回して調節します。調節範囲は目盛1から5までです。目盛3が成人の標準的穿刺深さに相当しますが、必要に応じて採血量が最適となるように目盛を調節して下さい。

目 盛					
穿刺深さ	より浅く穿刺します		標準的な深さ		より深く穿刺します


採血から測定まで

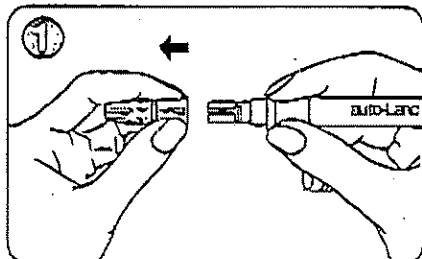


オートランセットIIのキャップのネジをほどき、はずして下さい。

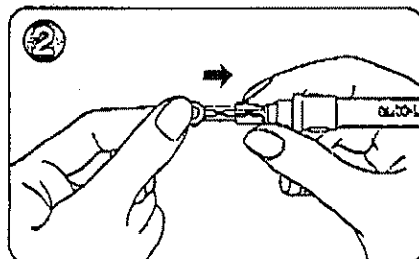


専用の採血針をホルダーにセットします。

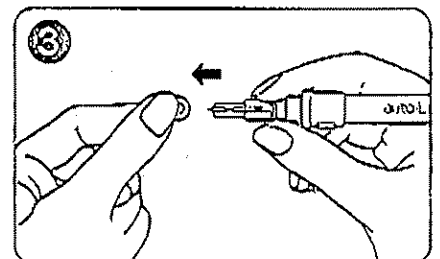


ホルダーにセットした採血針の保護キャップをねじり取ります。

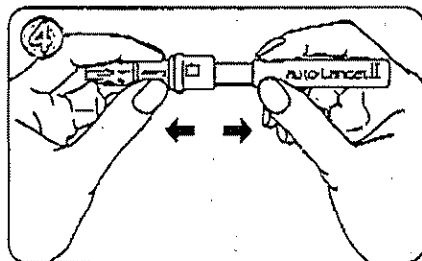


採血キャップを元どおりセットしたのち、カチッと音がするまでサヤの部分を引き伸ばします。引き伸ばしたサヤは自然に元の状態に戻ります。

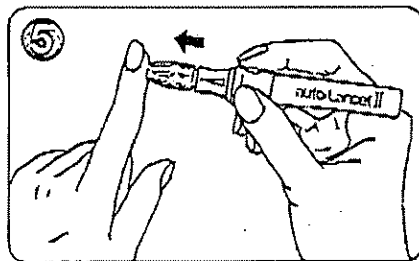

採血部位に採血キャップの先を押し当て四角いボタンを押すと瞬時に刺し傷ができます。血糖測定に必要な血液滴を得ます。

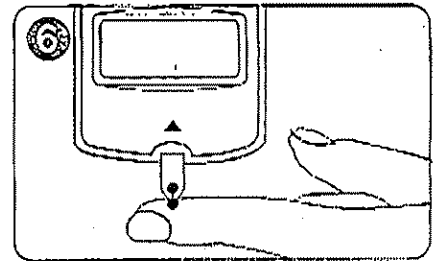

血糖測定を行います。測定後は止血を行い、使用済みの採血針は針先が露出しないようにして瓶、缶等に入れて処分して下さい。

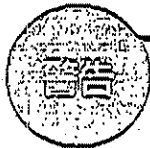

- 本製品を他の人と共用すると、付着した血液を介して微生物などによる感染のおそれがありますので、絶対に共用しないで下さい。
- 血糖測定をするときは、併用される採血針と血糖測定機の取扱説明書や使用上の注意をあわせてお読み下さい。



- 採血針の針先は非常に鋭利で危険です。採血針の取扱いには十分注意し、お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- 本製品を採血以外の目的に使用しないで下さい。

製品のお問い合わせは

フリーダイヤル
㈱三和化学研究所

0120-078130

お問い合わせ時間/9:00~12:00・13:00~17:00(月~金曜) ※祝日を除きます。

販売元
株式会社 三和化学研究所
SKK 本社/名古屋市東区東外堀町35番地 〒461

輸入元
テラメックス株式会社
京都市伏見区竹田西橋ノ井町37番地 〒612


TEL 0781 5211
GCU-12
5281011 1297

ご使用前に


1. 穿刺深さの調節は、前ページの説明書にしたがって行って下さい。
2. 採血針は、封筒の弊害製品をご使用下さい。
3. 採血針は使い捨てなので、毎回新しいものをご使用下さい。
4. 採血する時は、必ず採血部位を消毒して下さい。

使い方 オートランセットIIへの採血針のセット


1. 採血キヤツワのネジをほどいてははずします。新しい採血針をオートランセットIIのホルダーにしっかりとセットします。(図はフラインガーランセットを例に示しています。)

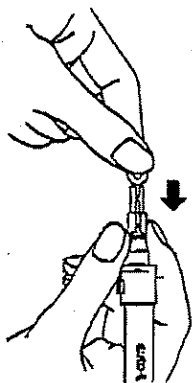


2. ホルダーにセットした採血針を指ではさみ採血針の丸い保護キヤツワをねじり取り取ります。

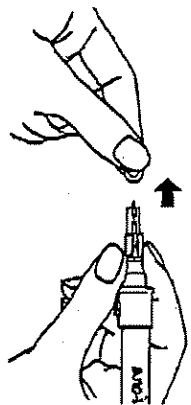

3. 採血キヤツワを元どおりにセットしてから両手の指で採血キヤツワとサヤの部分を持ってカチッと音がするまで引っ張ります。

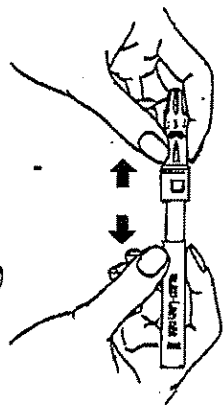


4. カチッと音がした後、サヤをはずすとサヤは自然に元の位置に戻ります。このとき、ダイヤルの目盛設定が正しいことを確認して下さい。

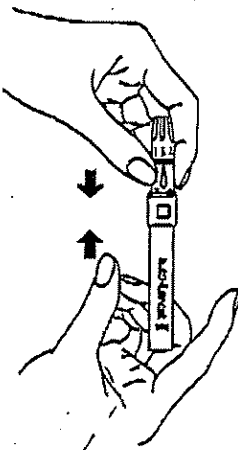


使い方 採血から測定まで

1. 採血部位としては、図のように指先の両側が推奨されています。

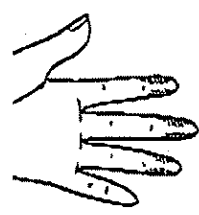


2. 指先に採血キヤツワの先端を軽く押し当て、四角いボタンの指すと一瞬の動作で指先に小さな刺し傷ができます。

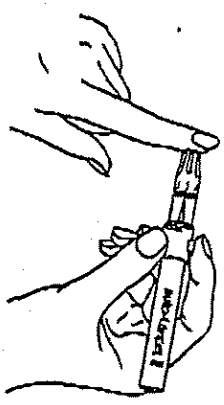


3. 血圧測定に必要な血液を得ます。刺し傷をつけても血液が出にくい場合は、手のひらから指先に向けてマツサーシします。



4. 得られた血液にグルコースセンサーの先端部を触れさせると、血液は自動的に吸引され測定を開始します。(ダイヤルトロールの場合は、試験紙に血液を塗布して測定を行います。)

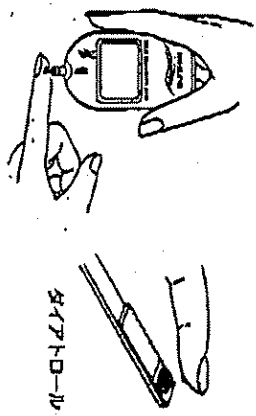


5. 血圧の測定が済みましたら、採血部位を絆創膏などで止血します。使用済みの採血針は採血キヤツワに刺して針先が露出しないようにして処分して下さい。

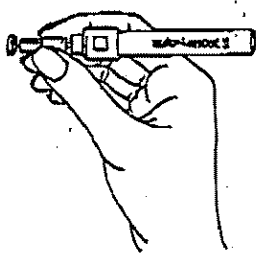

グルコースEーヌGT-1640/グルコースセンサー使用時のご注意

グルコースセンサーは血液を吸引させる時、血液量が極端に少ないと血糖値が低く測定されます。3マイクロリットル以上の血液を確実に吸引させて下さい。
 (グルコースE/グルコースE1/グルコースEーヌGT-1630/グルコースPRO使用時にしても同様です)

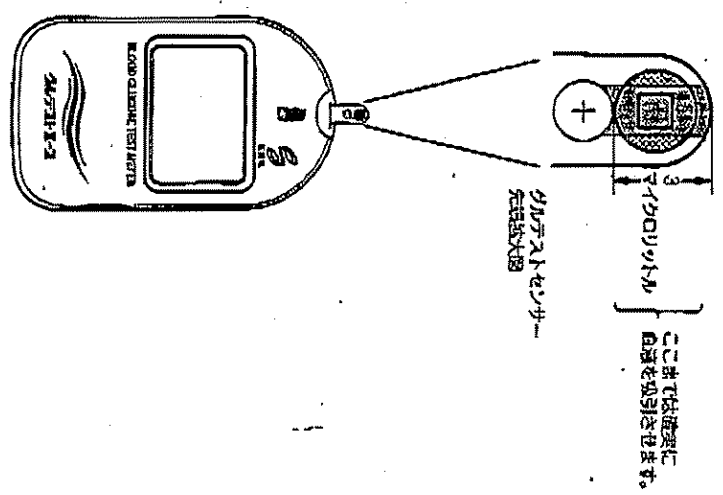

フリーダイヤル
 三和化学研究所
0120-078130

365日24時間お受けいたします。

株式会社 三和化学研究所
 東京都中央区東區外堀町五番地 5F(05-651)

テラメックス株式会社
 東京都目黒区目黒1-10-10 TEL:03-423

オートラジセット II 使用説明書

国産規格許可番号 289Y0021

オートラジセット II は、血糖値を測定するために、使い捨ての採血針を用いて少量の血液を採取するための器具です。オートラジセット II は、針が皮膚を穿刺する深さを5段階に調節できます。採血キヤワの目盛りを深さに合わせてからご使用下さい。

オートラジセット II 使用上のご注意

- 警告**
1. 本製品を他の人と共用すると、付着した血液を介して衛生事故などによる感染のおそれがありますので、絶対に共用しないで下さい。
 2. 血糖測定をするときは、採用される採血針と血糖測定機の取扱説明書や使用上の注意をおわせてお読み下さい。
- 注意**
1. 採血針の針先は非常に鋭利です。採血針の取扱には十分注意し、お子様の手の届かないところに保管して下さい。
 2. 本製品を採血以外の目的に使用しないで下さい。

穿刺深さの調節

穿刺深さは、図のように採血キヤワのダイヤルを回して調節します。調節範囲は目盛1から目盛5までの間で、数字が大きくなるほど針が深く刺さります。目盛3が成人の標準的な穿刺深さに相当します。
 (開封時、製品は目盛3に合わせています。)

血糖測定を行うときは、まず目盛3から戻して、適量量の血液が得られる場合はより小さい数字の目盛に合わせて下さい。また、必要な血液量が得られない場合にはより大きい数字の目盛に合わせてご使用下さい。

ダイヤルの目盛と穿刺深さ

目 盛	1	2	3	4	5
穿刺深さ	より浅く穿刺します	浅く穿刺します	標準的な深さ	より深く穿刺します	深く穿刺します

- 注意事項**
1. ダイヤルを目盛のないところまで強引に回転させると、採血キヤワが破損します。必ず目盛の範囲内で操作して下さい。
 2. 採血キヤワを洗浄するときは、アルコール消毒液と柔らかい布を用いて洗浄して下さい。決して器具全体を水に漬けないで下さい。
 3. 採血キヤワを洗浄した後は、十分自然乾燥してからご使用下さい。強制加熱や電子レンジの使用は避けて下さい。