


# マイクロレット 取扱操作説明書

マイクロレットは血糖測定時に指先等から微量の毛細血管を採血する採血器です。本器は操作が簡単なので、血糖自己測定の実施に際して有用です。

注意：血糖自己測定は必ず医師の指導に従って実施してください。


(各部の名称)

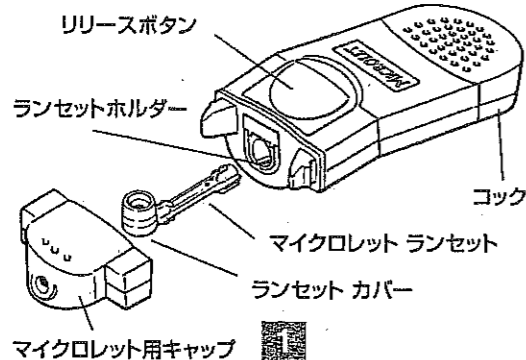

## 血糖自己測定に際して用意するもの

- 血液採取 ●マイクロレット  
注：マイクロレット用キャップは、標準穿刺用をセットしてあります。穿刺時に出血が少ない場合には深穿刺用のキャップをお使いください。
- マイクロレット ランセット  
●石鹸またはアルコール消毒綿
- 血糖測定 ●デクスター-Z / デクスター-Z センサーシステム

注意：マイクロレット ランセットは滅菌品です。1回限りの使用で捨て再使用はしないでください。マイクロレット ランセット以外のランセットは使用できません。

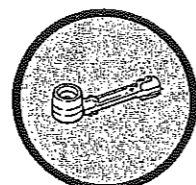

マイクロレット ランセット




使用できません

## 操作方法

1. 穿刺部位を決めて洗浄/消毒する  
温水と石鹸で手先をよく洗い清潔なタオルで水分をふき取り、乾燥させます。  
注：温水を用いることで血行が良くなり採血が容易になります。


### 2. マイクロレットのキャップを外す

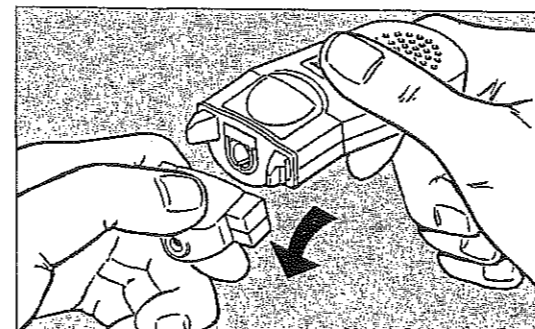


軽く下向きに曲げるように力を加えると、キャップは容易に取り外すことができます。

### 3. マイクロレット ランセットの装着


マイクロレット ランセットの先端のランセットカバーを1/4回転ほどひねり、接続を切ります。

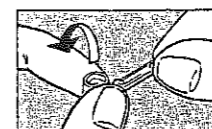

注意：ひねるだけで決してランセットカバーを針先から切り離さないでください。

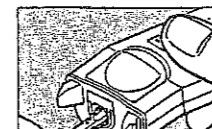

ランセットをマイクロレットのランセットホルダーに、「カチッ」という装着音がするまで押し込みます。

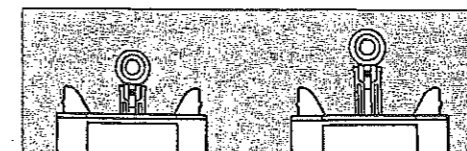

完全に装着された状態


装着が不完全

ここでランセットカバーを針先からひねり取り、針先を露出させます。

注：ひねり取ったランセットカバーはランセットを廃棄する時に再度針先に戻しますので棄てないでください。

### 4. キャップを装着する


2.で外したキャップの平坦な面をマイクロレットのリリースボタンのある面に合わせて、軽く押し込みます。

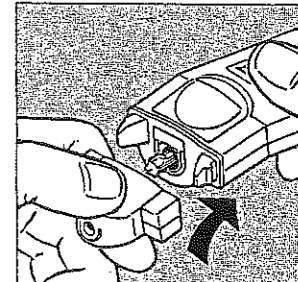

注：キャップの先端部には、標準穿刺用では3個の、深穿刺用では5個のポッチがあり、2種類のキャップを容易に区別することができます。


穿刺の深さは、使用するキャップと穿刺時にマイクロレットを穿刺部位に押し付ける力の加減により左右されます。何回かの操作で適切な操作のコツを会得してください。

注：コックを「カチッ」という音がするまで引き出すと、ランセットホルダーをランセットの装着位置にセットすることができます。

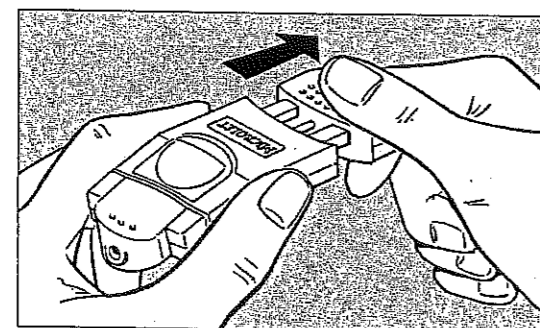

### 5. 穿刺部位の選択


指頭の両側面が穿刺部位として適しています。血流を指頭に集めるために、反対の手で手のひらから穿刺部位と決めた指先に向かってしごきます。

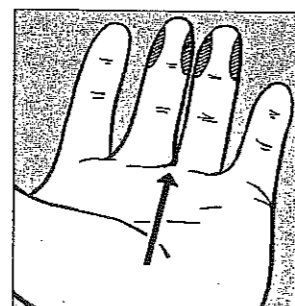

注意：しごく手が穿刺部位に触れることのないよう十分に注意してください。


### 6. 穿刺操作

マイクロレットのキャップの先端の開口部を穿刺部位にしっかりと押し付けます。押し付けた部分がずれないように注意しながらリリースボタンを押すとランセットの針先が瞬間的に開口部から飛び出し、穿刺が行われます。キャップを穿刺部位に強く押し付けるほど深く穿刺されます。

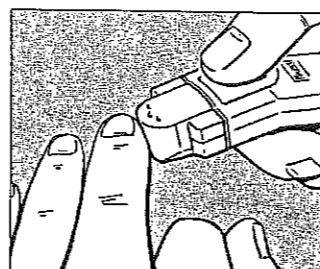

### 7. 出血させる

穿刺後数秒間待って、手を下に向けて、反対の手で指先から穿刺部位に向かって指をしごき、滴状に出血させます。

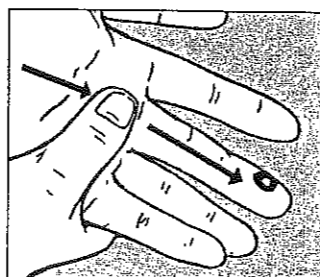


注意：穿刺部位の回りを締め付けないでください。

### 8. 血液をセンサーに点着する

デクスター-Z/デクスター-Z センサーシステムの取扱操作説明書/添付文書に従って、センサーの先端に血液を点着させます。指先に残った余分な血液は清潔なタオル、ティッシュペーパー等またはアルコール消毒綿でふき取り、出血が止まるまで軽く押さえておいてください。

### 9. ランセットを取り外す

先ずキャップを取り外します。

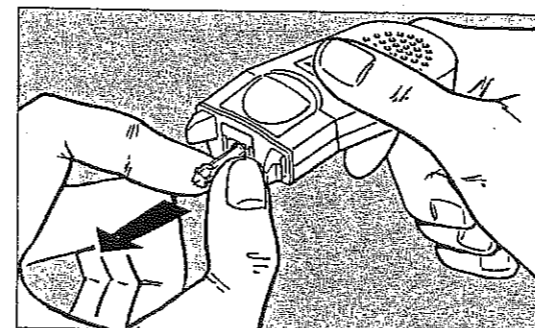


ランセットをランセットホルダーから抜き取ります。

注意：キャップは他の使用者のものに入れ替わることのないように注意してください。

### 3. でひねり取ったランセット

カバーの凹部にランセットの針先をはめ込みます。感染を避けるため、所定の廃棄方法に従って注意して廃棄してください。

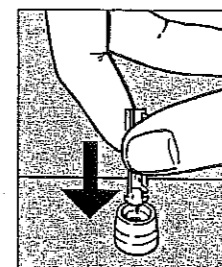

### 10. キャップを再装着する

#### 洗滌方法

キャップを取り外します。キャップおよびマイクロレットの各部を作用の緩和な洗剤で洗い流し、よく水ですすいでください。水分をふき取り、完全に乾燥させた後、キャップをマイクロレットに装着します。マイクロレットは次の使用に備えて、清潔な状態で保管してください。

- 包装 ●マイクロレット ..... 1個  
●マイクロレット用キャップ (標準穿刺用) ..... 1個  
●マイクロレット用キャップ (深穿刺用) ..... 1個  
●マイクロレット ランセット ..... 10個

製品に関する問い合わせ先  
バイエル・三共株式会社  
テレホンサービス: フリーダイヤル  
**0120-123119**

納入元  
バイエル・三共株式会社  
東京都中央区築地5丁目19番20号

採血用穿刺補助器具


# エースレット 使用説明書

エースレットは、血糖値を測定するために、使い捨ての採血針を用いて少量の血液を採取するための器具です。エースレットは、針が皮膚を穿刺する深さを6段階に調節できます。採血キヤップの目盛りを最適な深さに合わせてからご使用下さい。

## エースレット使用上の注意

- 警告**
1. 本製品を他の人と共用すると、付着した血液を介して微生物などによる感染のおそれがありますので、絶対に共用しないで下さい。
  2. 採血針の保護キヤップを外した状態で、エースレットに装着し、さらにエースレットのつまみ部分を引いたまま放置しないで下さい。
  3. 針が誤って穿刺される危険があります。血糖測定をするときは、併用される採血針と血糖測定機の取扱説明書や使用上の注意をあわせてお読み下さい。
- 注意**
1. 採血針の針先は非常に鋭利で危険です。採血針の取扱には十分注意し、お子様の手の届かないところに保管して下さい。
  2. 本製品を採血以外の目的に使用しないで下さい。

## エースレットと採血針の各部の名称

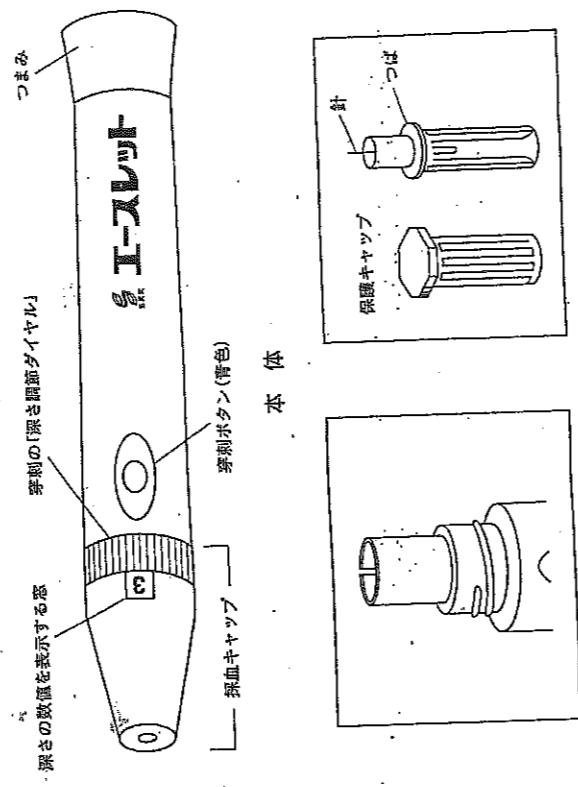


ホルダー  
採血キヤップをはずして出せます。  
採血針  
(ウルトラファイアインランセット-28G.30G.33G)

## エースレットの保管方法

- エースレットの外側はやわらかい布などでふいて、清潔を保って下さい。
- 決して水には浸さないで下さい。
- 採血キヤップは、取り外して刺激のない石鹸や水で洗うことができます。よく乾かしてから本体に取り付けて下さい。

## グルテストエースGT-1640/グルテストセンサー使用時のご注意

グルテストセンサーに血液を吸収させるとき、血液量が極端に少ないと血糖値が低く測定されます。3マイクロリットルの血液を確実に吸引させて下さい。  
(グルテストE/グルテストEII/グルテストエース/グルテストPRO使用時についても同様です。)

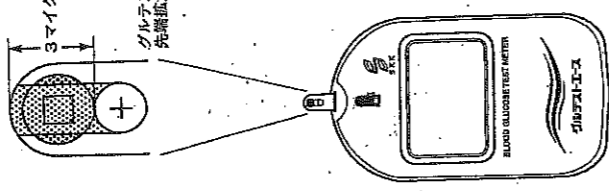

製品のお問い合わせは  
**0120-078130**

365日24時間お受けいたします。

フリーダイヤル  
三和化学研究所

株式会社 **三和化学研究所** 輸入元  
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社  
東京都港区赤坂3丁目5番地26号 〒107-0052